


KARIES SCREEN TEST. DE

Kontrolle ist gut -
getestet ist besser!

Anleitung für den Kariesscreentest Pufferkapazität

Der Kariesscreentest Puffer ermittelt die Pufferkapazität des Speichels. Diese macht eine Aussage zur Neutralisierungskapazität des Speichels gegenüber zugeführten Nahrungs- und Plaquesäuren.

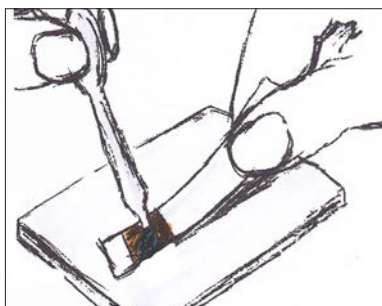

Entnehmen Sie bitte den Teststreifen aus der Verpackung. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass Sie das gelbe Feld nicht berühren. Anschließend geben Sie einen Tropfen Speichel auf das gelbe Feld.



Warten Sie 5 Minuten bis der Teststreifen das Ergebnis anzeigt.



Jetzt können Sie die Farbe des Testfeldes mit den beiliegenden Farbmustern vergleichen und so die Pufferkapazität des Speichels ermitteln.

Zeigt der Teststreifen die Farben blau bzw. gelb so signalisiert dies eine hohe bzw. niedrige Pufferkapazität des Speichels. Bei einer niedrigen Pufferkapazität sind weitere präventive Maßnahmen notwendig.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Diagnose-Therapie-Schema.

Lager- und Aufbewahrungshinweise:

- Lagerung bei 2--28 °C
- Ablaufdatum: siehe Etikette / Verpackung
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Gebrauchte Teststreifen mit dem Haus-/Praxismüll entsorgen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für zahnärztlichen Gebrauch!

Erstellungsdatum der Gebrauchsinformation: 5/2019

Fa. Aurosan GmbH
Frankenstraße 231, 45134 Essen

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemässer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.