



KARIES SCREEN TEST. DE

Kontrolle ist gut -
getestet ist besser!


Anwendung KariesScreenTest Speichel pH

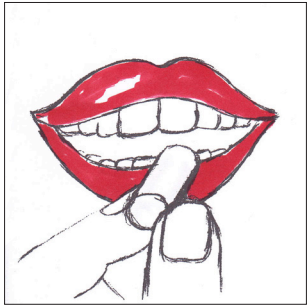

Speichel sammeln,
in der ersten Minute den Speichel
hinunterschlucken.

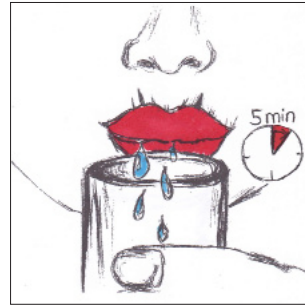

Danach für 5 Minuten den Speichel
sammeln und anschließend den
Speichel pH-Wert bestimmen.

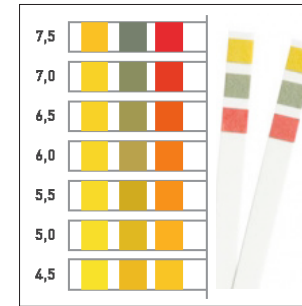

ph > 6,0 sehr gute Pufferkapazität

ph > 5,0 gute Pufferkapazität

ph < 5,0 ungünstige Pufferkapazität

ph < 4,0 extrem schlechte Pufferkapazität