


# KARIES SCREEN TEST. DE

Kontrolle ist gut -  
getestet ist besser!


## Bestimmung bakterieller Speichelparameter mit dem KariesScreenTest

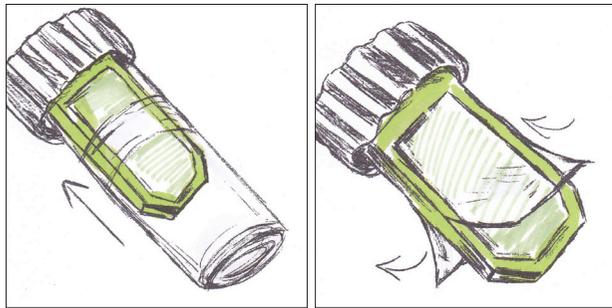

Doppel-Dip entnehmen  
und Folie abziehen




Beide Agare vollständig  
mit Speichel benetzen

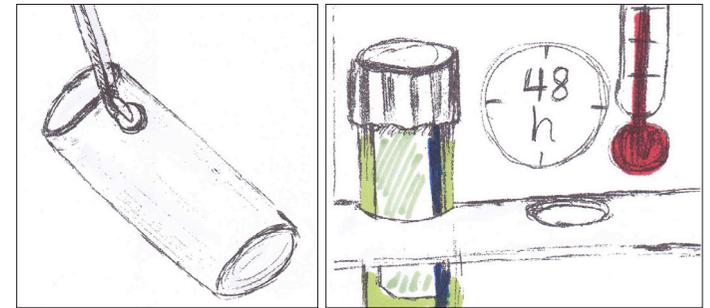


NaHCO<sub>3</sub> auf den  
Boden des Röh-  
rchens legen

Zwei Tage Inkubationszeit  
bei 37° C

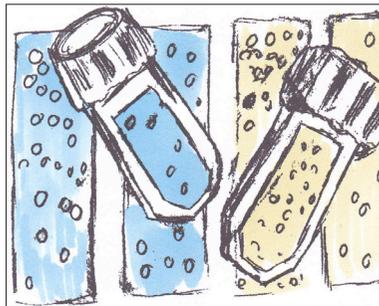


Mit Auswertungs-Chart vergleichen

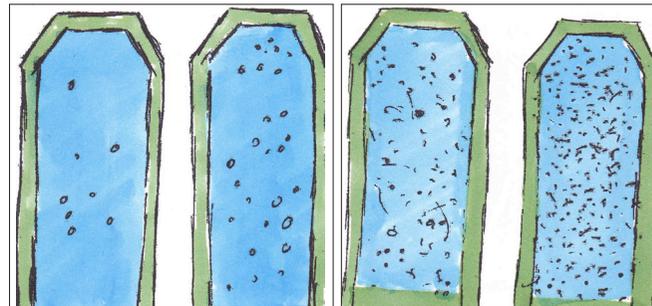

Geringe Koloniedichte

Hohe Koloniedichte

Mutans-Streptokokken

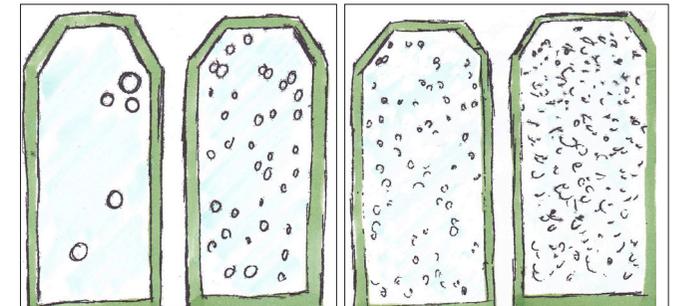

Geringe Koloniedichte

Hohe Koloniedichte

Laktobazillen